


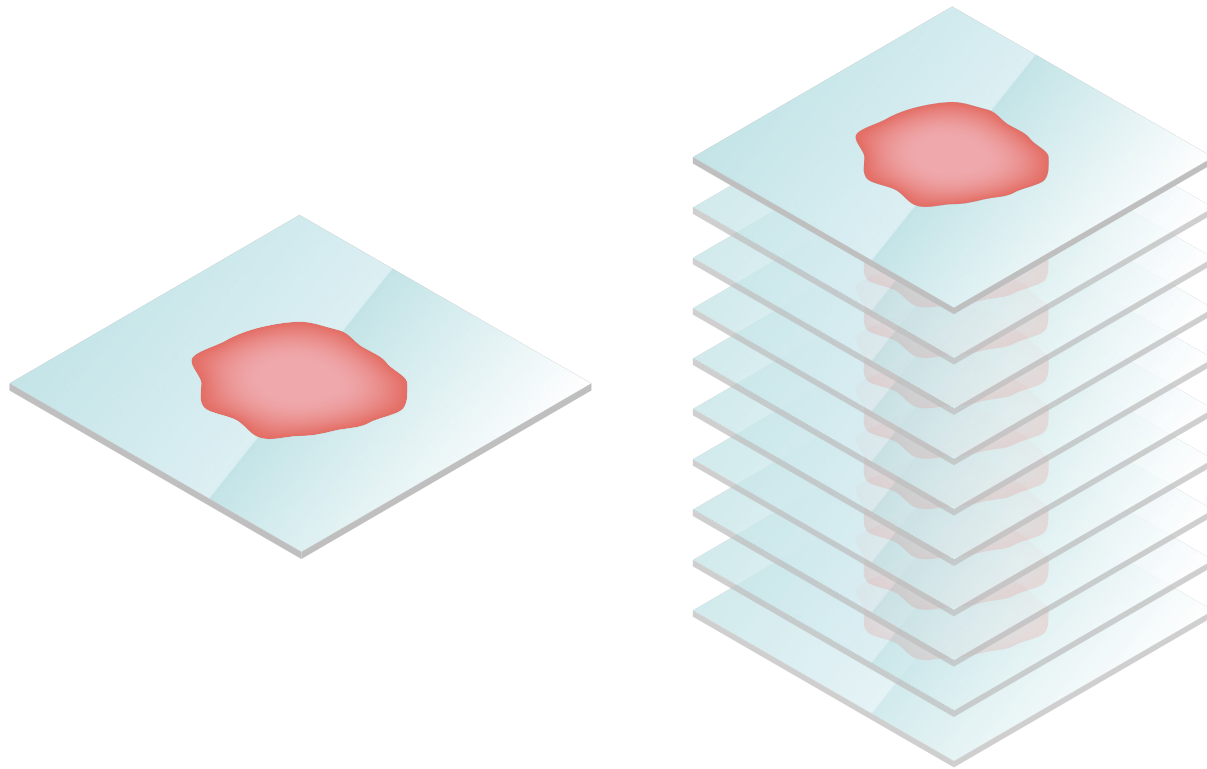

提出条件

ブロック作製後3年以内の検体から新しく薄切したもの

腫瘍含有率: 10% 以上

未染色: 10 枚 (5 μ m 厚 組織面積 2 mm $\times$ 2 mm 以上)
組織面積が満たない場合は、枚数を増やしてください。
(目安: 15~20 枚)

HE 染色: 1 枚 (腫瘍部分をマーキングしてください)

注意事項

FFPE 検体の品質は、検体の固定法、固定からの時間 (月日) によって大きく左右されます。

日本病理学会「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」の記載事項を厳守してください。